

Stap-voor-Stap bloedglucosemeting Met de Precision Xceed



Wat heeft u nodig?

- Precision Xceed bloedglucosemeter
- Precision Xtra Plus teststrip
- IJkstrip
- EasyTouch prikpen
- Nieuw lancet

Schoon prikken

Voor een betrouwbaar resultaat is het wassen van de prikplaats met water en zeep belangrijk. Er mag geen crème of lotion op de prikplaats achterblijven. Droog de prikplaats zorgvuldig.

Ketonen meten

Met de Precision Xceed kunt u, naast het meten van glucose, ook ketonen in het bloed meten. Lees hiervoor de gebruikershandleidingen van de Precision Xceed en de ketonen teststrips. Overleg met uw diabetesteam of dit voor u van toegevoegde waarde is.




1. Steek de ijkstrip, met de code en de contactstrepen omhoog gericht, in de gele insteekopening voor de teststrip. Duw de ijkstrip aan totdat dit niet verder gaat.

Het lotnummer verschijnt op het afleesvenster met de datum en tijd. Controleer of dit lotnummer overeenkomt met het lotnummer vermeld op de ijkstrip.



2. Open de verpakking van de teststrips door de inkeping aan de zijkant van de folie schuin open te scheuren. Het uiteinde van de teststrip met de contactstrepen komt nu vrij.

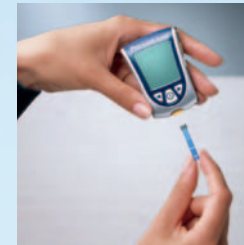


3. Steek de teststrip, met de blauwe kant boven, in de gele insteekopening van de meter. De meter gaat automatisch aan.

Het symbool bloed aanbrengen en het lotnummer verschijnen op het afleesvenster. Controleer of het lotnummer overeenkomt met het lotnummer vermeld op de ijkstrip, bijsluiters en verpakking van de teststrips.



4. Prik in de zijkant van uw vinger. Vorm een kleine druppel bloed.


Precision Xceed™

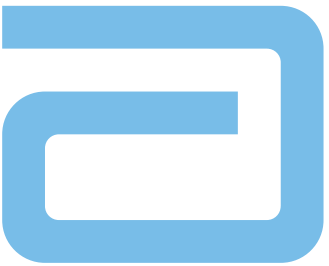


Stap-voor-Stap bloedglucosemeting Met de Precision Xceed



5. Met de Precision Xtra Plus bloedglucose teststrip kunt u het bloed op twee verschillende manieren aanbrengen. Kies de methode welke het beste bij u past.

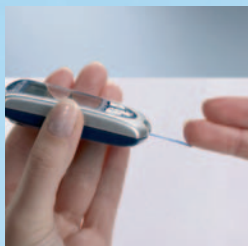

Top-fill methode: breng de bloeddruppel aan op het witte testvlak. De test begint vanzelf zodra een voldoende hoeveelheid bloed wordt waargenomen.

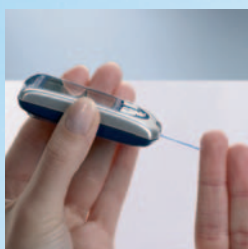

End-fill methode: raak de bloeddruppel aan met het uiteinde van de teststrip, het bloed wordt naar binnen gezogen en de test begint vanzelf.



6. Nadat u een voldoende hoeveelheid bloed heeft aangebracht, gaat de meter aftellen.

N.B. Indien de test niet start, kunt u binnen 5 seconden na de eerste druppel een tweede bloeddruppel aanbrengen.

Binnen enkele seconden verschijnt er een nauwkeurige uitslag!



Belangrijk:

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uitgebreide informatie over het Precision Xceed bloedglucose meetsysteem.

Lees bijsluiter teststrips

Lees voor tips over het gebruik van de teststrips de bijsluiter.

Voor meer informatie: Abbott B.V., Abbott Diabetes Care, Modemweg 2, 3821 BS Amersfoort
Klantenservice: 0800-022 88 28 (gratis) Internet: www.abbottdiabetescare.nl

 **Abbott**
Diabetes Care