

# Ketonen meten

## Met de Precision Xceed

Belangrijke richtlijnen om te volgen voor diabetes management, bij gebruik van de Precision Xceed bloedglucosemeter samen met de Precision Xtra  $\beta$ -Ketonen teststrips.



### 1. De Precision Xceed voorbereiden

Verwijder de teststrip uit de folieverpakking. Steek de teststrip, met de contactstrepen omhoog gericht, in de insteekopening. De meter zal automatisch de ijkcode en vervolgens 'ketone' en de melding 'bloed aanbrengen' weergeven in het afleesvenster.



### 2. In de vinger prikken

Prik in de zijkant van uw vinger. Vorm een kleine druppel bloed.

**BELANGRIJK:** Gebruik alleen bloedmonsters uit de vingertop voor het meten van ketonen.



### 3. Bloeddruppel aanbrengen op de teststrip


Breng de bloeddruppel in aanraking met het paarse gedeelte aan het uiteinde van de teststrip. De meting start automatisch. Zodra het testvlak voorzien is van voldoende bloed verschijnt er de statusbalk '■■■■' in het afleesvenster.



### 4. Aftellen naar resultaat

De meter zal automatisch aftellen van 10 naar 1. Daarna wordt het ketonenresultaat weergegeven. Het resultaat wordt in het geheugen van de meter opgeslagen.

Indien de meting niet start, kan een tweede bloeddruppel worden opgebracht binnen 30 sec. na het aanbrengen van de eerste druppel.

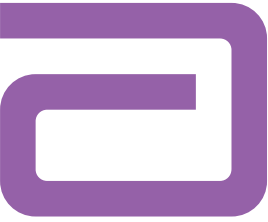

## Berichten in het afleesvenster

### Knipperende druppel

De meter is klaar om een bloeddruppel te ontvangen (of controleoplossing)

### Ketone HI

De meter heeft vastgesteld dat uw ketonenresultaat hoger is dan 6,0 mmol/L. Herhaal de meting. Volg de instructies van uw behandelend arts of verpleegkundige.

### Melding E-3 of E-4

Er is een probleem met de teststrip. Herhaal de meting. Indien dit bericht opnieuw verschijnt, noteer dan het nummer en raadpleeg de gebruikershandleiding en de bijsluiters van de teststrips.

### IJKfout

Uw meter kan geen ijking uitvoeren. Herhaal de ijking.

## IJken

De meter dient te worden geijkt voor elk nieuw doosje ketonen teststrips.

Steek de ijkstrip, met de code en contactstrepen omhoog gericht, in de insteekopening. Druk de ijkstrip aan totdat dit niet verder gaat.

De ijkcode verschijnt op het afleesvenster met de datum en tijd. Controleer of deze code overeenkomt met de code vermeld op de ijkstrip.

**LET OP:** Raadpleeg de gebruikershandleiding voor uitgebreide informatie over het meten van ketonen met de Precision Xceed bloedglucosemeter.

