



## De naald verwijderen

10 Breng het witte buitenste naaldbeschermkapje weer aan en schroef de pennaald los. Controleer altijd of uw pennaald verwijderd is. Zet de pendop weer op de Autopen® 24. Gooi gebruikte pennaalden zorgvuldig weg in overeenstemming met het advies van uw arts/diabetesverpleegkundige of lokale voorschriften.


## Een patroon aanbrengen

11 Verwijder de naald, draai de patroonhouder van het penhuis en verwijder de patroon.


12 Draai de zuigerstang terug door het onderste grijze gedeelte van het penhuis tussen duim en wijsvinger vast te houden. Draai het penhuis rond tot de zuigerstang helemaal is teruggedraaid. Ga nu terug naar stap 3 voor het inzetten van een nieuwe patroon.

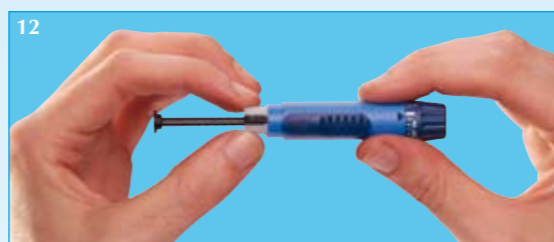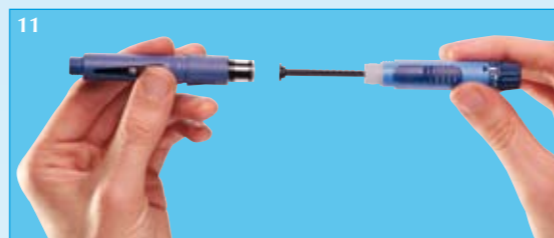

# Autopen® 24 instructies

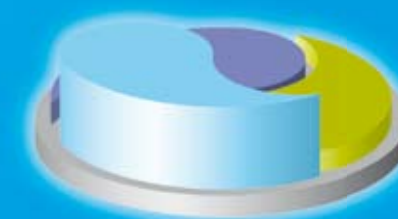

# Autopen® 24 instructies

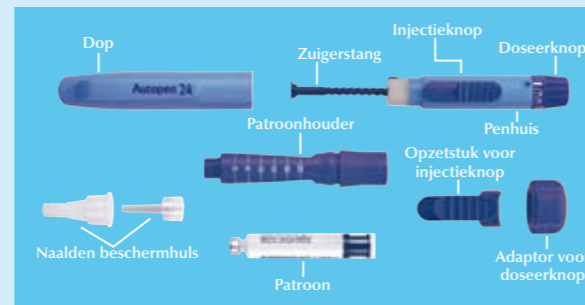

**Autopen® 24 is een gemakkelijk te gebruiken insuline-injectiepen en is bestemd voor gebruik met sanofi-aventis insulinepatronen van 3,0 ml. Te gebruiken in combinatie met alle pennaalden\*.**

## Een patroon aanbrengen

**1** Trek de pendop van het penhuis en draai het penhuis los van de patroonhouder.

**2** Controleer of de zuigerstang volledig teruggedraaid is (afb. 2a). Indien de zuigerstang uitgedraaid is, raadpleeg dan stap 12 (afb. 12) om te zien hoe deze weer wordt teruggedraaid.


**3** Zet de insulinepatroon met het metalen kapje als eerste in de patroonhouder.

**4** Schroef de patroonhouder en het penhuis stevig aan elkaar vast.

## Uw Autopen® 24 ontlichten

**5** Verwijder het beschermkappje van een nieuwe pennaald. Schroef de pennaald recht op de patroonhouder (afb. 5a). Verwijder het buitenste beschermkappje en de naalddop van de pennaald.

*Indien de patroon NPH (basaal) insuline bevat, beweeg de pen dan minimaal 10 keer op en neer zoals beschreven in de instructies voor de patroon. Bevestig daarna de naald aan de patroonhouder. De stappen 6 en 7 moeten vóór iedere injectie worden uitgevoerd.*

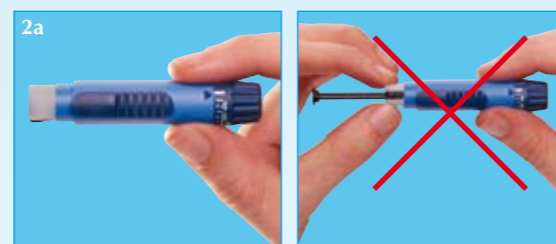

**6** Het is belangrijk dat de Autopen® 24 voorafgaand aan gebruik ontlicht wordt, zodat alle lucht die eventueel in de naald aanwezig is, wordt verwijderd. Bij gebruik van een nieuw patroon moet de doseerknop op 8 eenheden worden ingesteld (afb. 6a/6b).



**7** Houd de Autopen® 24 met de pennaald naar boven gericht. Druk de injectieknop in en houd deze ingedrukt in de richting van de naald totdat de pijl ► op het penhuis terugkeert naar de startlijn — op de doseerknop. In het vervolg hoeft de knop alleen maar op 2 eenheden te worden ingesteld. Ga door met instellen en 'injecteren' van 2 eenheden totdat er insuline aan de naaldpunt verschijnt (afb. 7a/7b).



De Autopen® 24 is nu klaar voor gebruik.

## Uw dosis injecteren

**8** Zorg ervoor dat het pijltje ► op het penhuis naar de startlijn — op de doseerknop wijst. Stel het gewenste aantal eenheden in. Probeer nooit om de doseerknop terug te draaien. Hierdoor kan de Autopen® 24 beschadigd raken en kan de dosis onnauwkeurig zijn. Mocht de doseerknop te ver zijn doorgedraaid dan raden we aan om de onjuiste dosis geheel te verwijderen en vervolgens de vereiste dosis opnieuw in te stellen. Zorg ervoor, alvorens te injecteren, dat het pijltje ► naar het juiste aantal eenheden op de doseerknop wijst. Op de afbeeldingen 8a en 8b is bijvoorbeeld de juiste stand te zien voor het toedienen van 20 eenheden insuline.



**9** Breng de naald in met behulp van de injectietechniek zoals aanbevolen door uw arts/diabetesverpleegkundige. Druk de injectieknop in de richting van de pennaald en houd de knop ingedrukt totdat de startlijn op de doseerknop teruggekeerd is naar het pijltje op het penhuis ►—. Tel tot 10 en haal vervolgens de naald uit de huid.



*Indien de doseerknop stopt voordat de startlijn — terug is bij het pijltje ► dan betekent dit dat u niet de volledige dosis heeft ontvangen. De doseerknop laat het aantal eenheden zien dat nog geïnjecteerd moet worden om de insulinetoediening te voltooien.*

\*Gegevens beschikbaar. Inhoud correct ten tijde van publicatie.