

! Voer voor elke injectie de veiligheidstest uit om foutieve doseringen te voorkomen

OptiClik® instructies


1

- Plaatsen van het patroonsysteem




2

- Bevestigen van een nieuwe naald

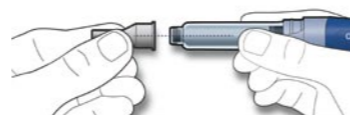




3


- Instellen en injecteren van de dosis

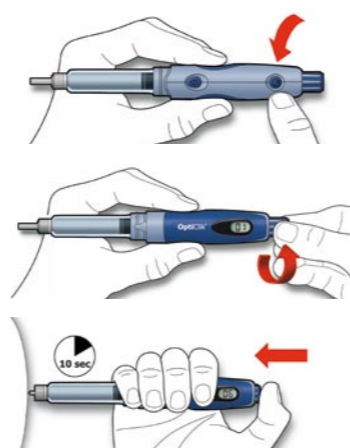

4

- Vervangen van een leeg patroonsysteem

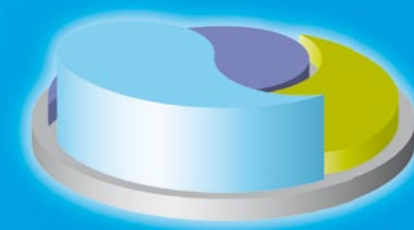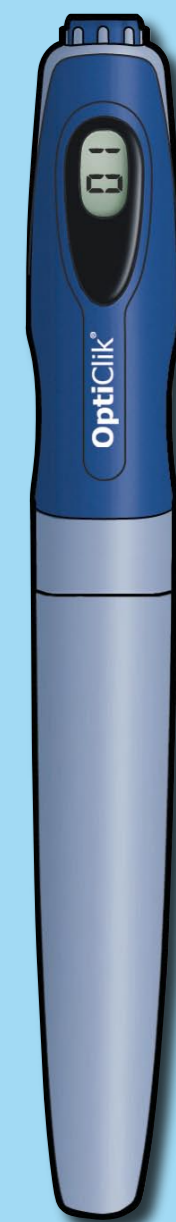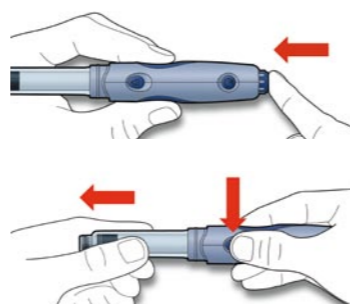

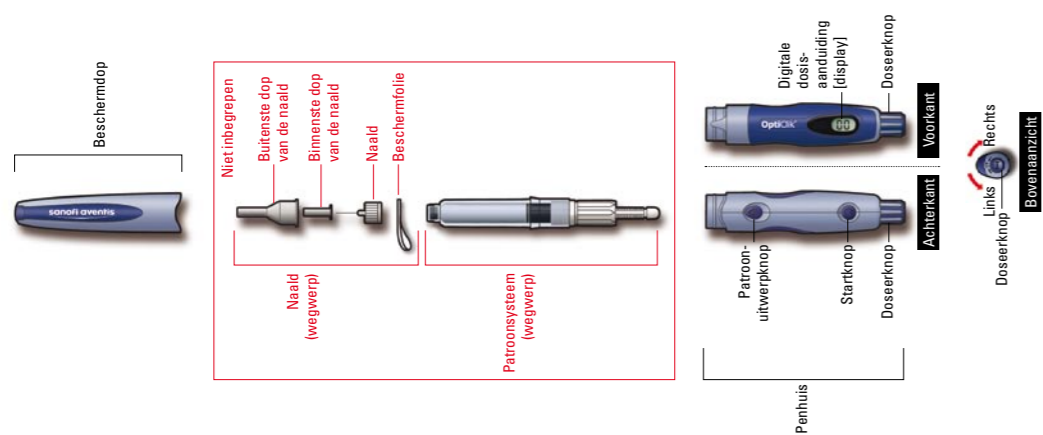

1 Plaatsen van het patroonsysteem

1. Verzeker u ervan dat de doseerknop is ingedrukt. Het patroonsysteem kan alleen geplaatst worden als de doseerknop ingedrukt is.
2. Houdt de OptiClik vast met de patroonuitwerpknop naar boven. Bekijk het label op het patroonsysteem om te controleren dat u de juiste insuline hebt. Schuif het patroonsysteem recht in het penhuis. Verzeker u ervan dat deze vastklikt. Draai het patroonsysteem zonedig een beetje. Niet forceren.
3. Om zeker te weten dat het patroonsysteem goed op zijn plaats is vastgeklikt, kunt u proberen het patroonsysteem er zachtjes uit te trekken. Het patroonsysteem mag niet loskomen. Tijdens of na afloop van deze check mag u niet op de patroonuitwerpknop drukken.

Bewaar de OptiClik nooit in de koelkast! Het koelen van het penhuis kan elektronische functies van de OptiClik beschadigen.

2 Bevestigen van een nieuwe naald

1. Verwijder de beschermfolie van de buitenste naaldbeschermingsdop.
2. Bevestig de nieuwe naald recht op het patroonsysteem.
3. Verwijder de buitenste dop van de naald. Bewaar de dop om later de naald in weg te gooien. De binnenste dop van de naald blijft op zijn plaats.

3 Uitvoeren van een veiligheidstest



Voor het uitvoeren van een veiligheidstest dient een naald bevestigd te zijn!

Voer de veiligheidstest uit voor elke injectie, om foutieve doseringen te voorkomen. Druk niet op de patroonuitwerpknop tijdens de veiligheidstest.

1. Druk op de startknop. De doseerknop komt omhoog.
2. In de digitale dosisaanduiding wordt "00" weergegeven.
3. Draai de doseerknop naar rechts (van u af) tot deze klikt. In de digitale dosisaanduiding wordt "01" weergegeven.
4. Verwijder het binnenste dopje van de naald. Behandel de onbeschermd naald voorzichtig.

OptiClik instructies


In deze beknopte handleiding vindt u de voornaamste gegevens over de OptiClik. Raadpleeg de volledige informatie in de bijsluiters, voordat u de pen voor de eerste keer gebruikt en bij problemen of detailvragen.

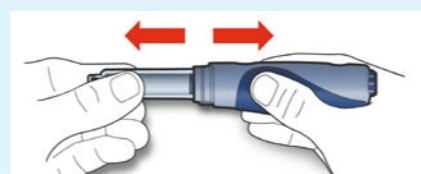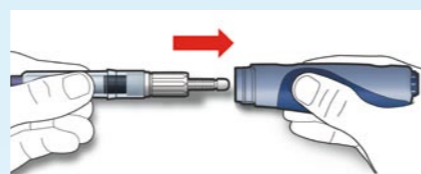

3. Houdt de OptiClik met de naald naar boven. Druk de doseerknop volledig in totdat hij ingedrukt blijft. Uit de punt van de naald moet insuline komen. Zo niet, ga terug naar stap 1 en herhaal de veiligheidstest. Bij gebruik van een nieuw patroonsysteem moet dit mogelijk meermalen herhaald worden.

Voor iedere injectie moet de veiligheidstest worden uitgevoerd.



Als er na meerdere pogingen geen insuline uit de punt van de naald komt, kan het zijn dat het patroonsysteem beschadigd is, de naald verstopt is, of dat er nog steeds luchtbelletjes in het patroonsysteem zitten. Het kan zijn dat u de naald of het patroonsysteem dient te vervangen. In de sectie "Hulp" op pagina 22 staat meer informatie over de veiligheidstest.

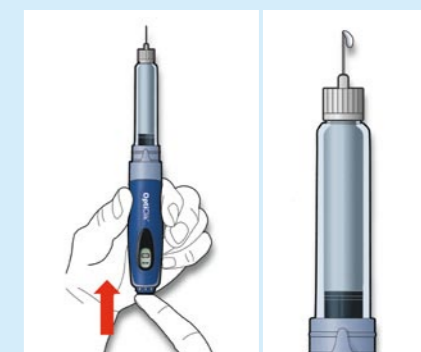

4 Instellen en injecteren van de dosis

Ga niet verder voordat u een succesvolle Veiligheidstest heeft uitgevoerd.



1. Druk op de startknop.
2. Draai de doseerknop langzaam naar rechts (van u af) tot u de gewenste dosering bereikt hebt. Daarbij moet u een aantal klikken voelen en horen. Let erop dat de doseerknop niet tussen twee dosisstappen in staat. Als een te hoge dosering is gekozen, kan de doseerknop eenvoudig worden teruggedraaid (naar links).
3. Kijk voor het injecteren goed op het etiket van uw patroonsysteem om te zien of u de juiste insuline hebt. Steek de naald loodrecht in de huid, zoals uitgelegd door uw arts of diabetesverpleegkundige (neem b.v. een huidplooi van buik, dij of bil en steek de naald hier loodrecht in).
4. Druk de doseerknop langzaam en volledig in. Het getal in de digitale dosisaanduiding telt niet af als u injecteert. Tel langzaam tot 10, terwijl u de doseerknop ingedrukt houdt, voordat u de naald uittrekt. De doseerknop moet ingedrukt blijven. Als de doseerknop ingedrukt blijft na het injecteren, geeft dit aan dat de volledige dosis is toegediend.

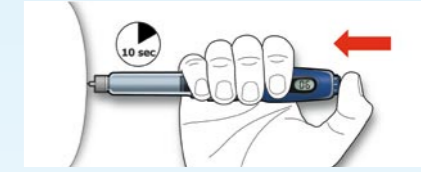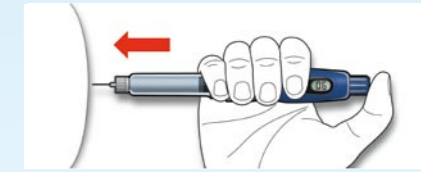

5 Verwijderen van de naald

1. Plaats de buitenste naaldcap voorzichtig over de naald.
2. Verwijder na elke injectie de naald van de pen. Werp de naald veilig weg.

Plaats na gebruik altijd de beschermkap weer op de pen. De OptiClik kan tot de volgende injectie met aangebracht patroonsysteem worden bewaard. Bewaar de OptiClik bij kamertemperatuur en uit direct zonlicht. Niet in de koelkast bewaren!

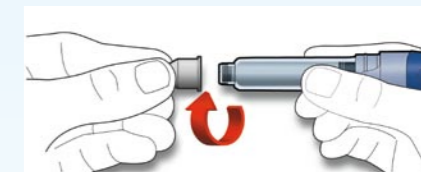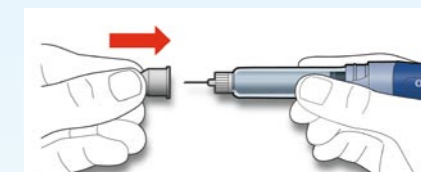

6 Vervangen van een leeg patroonsysteem

Volg deze stappen alleen indien het patroonsysteem leeg is.

1. Verzeker u ervan dat de doseerknop is ingedrukt. Het is niet mogelijk het patroonsysteem te vervangen als de doseerknop niet volledig ingedrukt is.
2. Druk op de patroonuitwerpknop en verwijder het gehele patroonsysteem. Gooi het gehele patroonsysteem weg.

