


FlexPen®
eenvoud & gemak

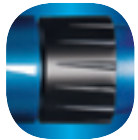

Bepaal met een simpele
handomdraai de dosering
en druk op de knop.



- Eenvoudige dosisinstelling
- Groot en duidelijk display
- Gemakkelijke dosiscorrectie



04088-919340

Novo Nordisk B.V.

Postbus 443
2400 AK Alphen aan den Rijn
T (0172) 44 96 00

informatie@novonordisk.com
www.novonordisk.nl



Mijn racket, mijn FlexPen®!



- Eenvoudige dosisinstelling
- Groot en duidelijk display
- Gemakkelijke dosiscorrectie



FlexPen®
eenvoud & gemak

FlexPen®

Uw arts heeft u een insuline van Novo Nordisk voorgeschreven. Bij deze insuline hoort een speciale voorgevulde insulinepen: FlexPen®. Het gebruik is eenvoudig: plaats een naaldje (NovoFine® 6 of 8 mm) op de pen, bepaal met een simpele handomdraai de dosering en druk op de knop.

Gebruiksvriendelijkheid staat voorop

FlexPen® is in te stellen op elke gewenste dosis in stapjes van 1 eenheid. Die ziet u groot en duidelijk op het afleesvenster staan. FlexPen® kan op maximaal 60 eenheden worden ingesteld. De dosis is eenvoudig te corrigeren door de instelknop verder of terug te draaien zonder dat er insuline verloren gaat. Mocht er minder dan de gewenste hoeveelheid insuline aanwezig zijn in FlexPen® dan blokkeert de instelknop automatisch. De pen heeft een ergonomische vormgeving en kan moeiteloos met één hand worden bediend.

Voor wie is FlexPen® bedoeld?

- De pen is bedoeld voor mensen met diabetes die voor het eerst insuline gaan gebruiken.
- Voor mensen die problemen hebben met hun huidige toedieningssysteem.

N.B.: Neem voor gebruik van FlexPen® eerst contact op met uw behandelend arts of diabetesverpleegkundige.




FlexPen® is milieuvriendelijk

FlexPen® is gemaakt van materiaal dat ons milieu niet belast. Bij verbranding blijven slechts kool-dioxide en water over. Na gebruik kunt u FlexPen® deponeren in de huisvuilcontainer of terugbrengen bij uw apotheek. Zorg er wel voor dat de gebruikte naald in een speciale naald-container wordt weggegooid.


Injecteren met FlexPen®

1 Bij het eerste gebruik van FlexPen® met een troebele insuline:

Rol de pen 10 keer tussen uw handpalmen - het is belangrijk dat de pen horizontaal gehouden wordt. Beweeg de pen daarna 10 keer op en neer, waarbij het glazen bolletje van de ene naar de andere kant moet rollen. Herhaal het rollen en op en neer bewegen totdat de vloeistof gelijkmatig wit en troebel is. Het mengen gaat makkelijker wanneer de insuline de kamertemperatuur heeft bereikt. **Voor elke injectie:** Beweeg de pen minstens 10 keer op en neer tot de vloeistof gelijkmatig wit en troebel is.

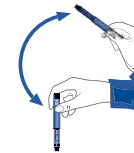

2 Verwijder de pendop en plaats een NovoFine® naald (handvast). Gebruik bij iedere injectie een nieuwe naald.

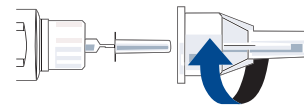


3 Stel twee eenheden in.




4 Houd FlexPen® rechtop en tik zachtjes tegen het insuline-reservoir. Druk de drukknop helemaal in totdat er een druppel insuline boven aan de naald verschijnt.




5 Draai nu de instelknop zodanig dat de juiste dosering in het afleesvenster verschijnt.

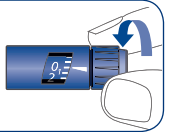

6 Neem FlexPen® in één hand en injecteer de insuline door de drukknop rustig, zo diep mogelijk in te drukken. Houd de drukknop ingedrukt en tel tot 6 voordat u de NovoFine® naald uit de huid trekt.

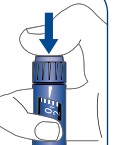

7 Gooi de naald na de injectie op een daartoe geschikte wijze (naaldcontainer) weg.

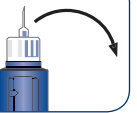

Let op:

Voor elke injectie (en bij het in gebruik nemen van een nieuwe FlexPen®) dient er een 'airshot'-plaats te vinden als functietest en om de pen te ontluchten. Dit betekent: stap 3 en 4 herhalen totdat er een druppel insuline bovenaan de naald verschijnt.

Moeiteloos de dosis corrigeren

U kunt de ingestelde dosis corrigeren door de instelknop terug te draaien totdat de correcte dosis in het afleesvenster verschijnt. Hierbij gaat er geen insuline verloren.

Volgende injectie

Na het toedienen van een dosis insuline eindigt FlexPen® in de 0-stand. FlexPen® is hierdoor direct klaar (na het uitvoeren van een airshot) voor de volgende injectie.