


Overstappen van
NovoLet® naar
FlexPen® / NovoPen® 3

informatie voor de gebruiker

NovoLet

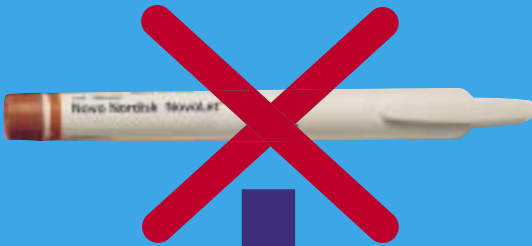

FlexPen / NovoPen® 3



Met ingang van 31 december 2006 stopt Novo Nordisk met de levering van NovoLet®. Dit betreft Actrapid® NovoLet, Mixtard® 30 NovoLet, Mixtard® 40 NovoLet en Mixtard® 50 NovoLet. Omdat u gebruik maakt van NovoLet heeft u deze folder meegekregen. U kunt hierin lezen welke gevolgen dit voor u heeft.

Waarom moet ik veranderen van insulinepen?


In 2002 introduceerde Novo Nordisk FlexPen®. FlexPen is een voorgevulde insulinepen die een aantal verbeteringen kent ten opzichte van NovoLet. Inmiddels maken veel mensen met diabetes gebruik van FlexPen voor de toediening van insuline. Steeds minder mensen met diabetes maken nu nog gebruik van NovoLet. Uit onderzoek gehouden onder behandelaren blijkt ook dat de waardering voor FlexPen veel hoger is dan voor de verouderde NovoLet.

Mogelijkheid 1:

U stapt over op FlexPen

FlexPen is een voorgevulde insulinepen voor meervoudig gebruik. FlexPen bevat 300 eenheden insuline en is in het gebruik zeer eenvoudig. FlexPen is in te stellen op elke gewenste dosis tussen 1 en 60 eenheden in stapjes van 1 eenheid. Het afleesvenster is groot en duidelijk. Een te hoog aantal ingestelde eenheden is eenvoudig te corrigeren door de instelknop terug te draaien. Daarnaast geeft FlexPen een duidelijke klik bij elke eenheid die u instelt.



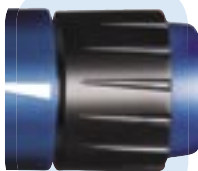

FlexPen is verkrijgbaar met een aantal insulines, waaronder insuline-analogen. Insuline-analogen behoren tot de nieuwste generatie insulines. Door een kleine verandering van het insulinemolecuul ontstaat een insuline met andere eigenschappen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw behandelaar.



Mogelijkheid 2:

U stapt over op NovoPen® 3

NovoPen 3 is een duurzame insulinepen waarin u zelf een patroon met insuline kunt doen (zoals een patroon inkt in een vulpen). De patronen noemen we Penfill. Deze zijn met verschillende soorten insuline van Novo Nordisk verkrijgbaar. Een Penfill patroon bevat 300 eenheden insuline.

NovoPen 3 is verkrijgbaar in een zilveren, donkergroene en donkerblauwe uitvoering. De dosis is in te stellen in stapjes van 1 eenheid van 2 tot en met 70 eenheden.

Uw behandelaar bespreekt met u de overgang naar NovoPen 3 en legt u het gebruik van dit pensysteem uit.

Neem contact op met uw behandelaar om te bepalen welke van bovenstaande behandelmogelijkheden voor u het meest geschikt is.

De verschillen in een overzicht



NovoLet

- Instelbaar per 2 eenheden
- Corrigeren door terugdraaien van de dop
- Geen klik per eenheid
- In te stellen dosis moet worden opgeteld
- Dosis aflezen d.m.v. het streepje op de dop
- Instelbaar tot max. 78 eenheden
- Voorgevulde insulinepen
- Geen automatische blokkade indien minder insuline aanwezig is dan de benodigde hoeveelheid insuline



FlexPen

- Instelbaar per 1 eenheid
- Eenvoudige dosiscorrectie door terugdraaien
- Duidelijke klik per eenheid
- In te stellen dosis hoeft niet te worden opgeteld
- Groot en duidelijk afleesvenster
- Instelbaar tot max. 60 eenheden
- Voorgevulde insulinepen
- Automatische blokkade indien minder insuline aanwezig is dan de benodigde hoeveelheid insuline



NovoPen 3

- Instelbaar per 1 eenheid
- Correctie door uittrekken van de penschacht
- Duidelijke klik per eenheid
- In te stellen dosis hoeft niet te worden opgeteld
- Duidelijk afleesvenster
- Instelbaar tot max. 70 eenheden
- U vervangt zelf de lege Penfill patroon
- Automatische blokkade indien minder insuline aanwezig is dan de benodigde hoeveelheid insuline

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze folder over FlexPen en onze voorlichtingsbrochure Insulinetoedieningssystemen.

Novo Nordisk Farma B.V.

Postbus 443
2400 AK Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 449 600

www.novonordisk.nl
informatie@novonordisk.com

