

Patroon verwisselen

Voor het verwisselen van Penfill® verwijzen we je naar de gebruiksaanwijzing die in de verpakking van NovoPen® Junior zit.



NovoPen® Junior



NovoPen® Junior

De pen die bij jou past



Novo Nordisk B.V.

Postbus 443
2400 AK Alphen aan den Rijn
T +31 (0)172 44 96 00

informatie@novonordisk.com
www.novonordisk.nl

02091-921059



NovoPen® Junior

NovoPen® Junior

Je dokter heeft je een insuline van Novo Nordisk voorgeschreven. Bij deze insuline hoort een speciaal voor kinderen ontworpen duurzame insulinepen: NovoPen® Junior.

Het gebruik is eenvoudig: plaats een naaldje (NovoFine® 6 of 8 mm) op de pen, bepaal met een simpele handomdraai de dosering en druk op de knop.

Gebruiksvriendelijkheid staat voorop

NovoPen® Junior maakt gebruik van de uiterst betrouwbare techniek van NovoPen®.

NovoPen® Junior is instelbaar in stapjes van een halve eenheid, van 1 tot maximaal 35 eenheden. Wanneer je de verkeerde dosis hebt ingesteld kun je dit gemakkelijk herstellen zonder verlies van insuline. Via een venster met schaalverdeling kun je zien of er nog voldoende insuline aanwezig is in de patroon (Penfill®).

Door de kleurcodering van de insulinepatronen kan gecontroleerd worden of de juiste insuline in NovoPen® Junior zit.

Wanneer de insulinepatroon leeg is kan deze vervangen worden door een nieuwe patroon.


Vele toepassingsmogelijkheden

- Je kunt NovoPen® Junior gebruiken met de insulines van Novo Nordisk in Penfill® patronen.
- NovoPen® Junior is ontworpen voor gebruik in combinatie met NovoFine® 6 en 8 mm naalden.

Injecteren met NovoPen® Junior


1

Draai de pendop los en trek de dop van de pen af.

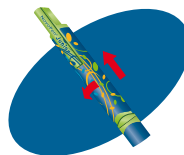

2

Verwijder het afdekklaasje van een NovoFine® naald en schroef de naald stevig op de patroondop. Haal de naaldverpakking en het beschermdopje van de naald af.

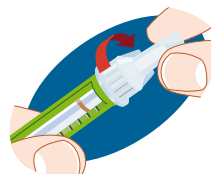


3

Vóór elke injectie (en bij het in gebruik nemen van een nieuwe patroon) dient er een 'airshot' gedaan te worden om de patroon te ontluchten. Stel 2 eenheden in, houd NovoPen® Junior rechtop en tik zachtjes met je vinger tegen de Penfill® patroonhouder. Druk de drukknop helemaal in totdat er een druppeltje insuline bovenaan de naald verschijnt. Verschijnt er geen druppel? Herhaal dan bovenstaande instructies tot dit wel het geval is.




4

Stel het aantal eenheden in dat je moet injecteren. Halve eenheden worden weergegeven als rechte lijnen tussen de getallen in.

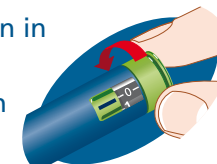

5

Je injecteert door de druk-/draaiknop zo ver mogelijk in te drukken. Na het injecteren dient de naald tenminste 6 seconden in de huid te blijven.

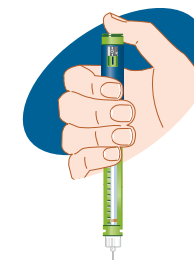

6

Na het injecteren schuif je de naaldverpakking weer op de naald en schroef je de naald los. Gooi de naald op een daartoe geschikte wijze (naald-container) weg. Plaats de pendop op de pen.



Dosis corrigeren

Draai je per ongeluk te ver door, trek dan het mechanische gedeelte en de Penfill® patroonhouder een stukje uit elkaar **(A)**. Druk vervolgens de druk-/draaiknop in (bijv. door deze tegen een hard oppervlak te drukken **(B)**) tot de nul verschijnt en laat dan voorzichtig los. Stel vervolgens het juiste aantal eenheden in.

